

RUGHOEK




Draai de knoppen links en rechts van de rugleuning los. Stel de rugleuning in de gewenste stand en draai de knoppen links en rechts weer vast.

ARMSTEUNEN




Trek de armsteun iets omhoog om de armleuning weg te draaien. Zorg er voor bij het terugdraaien dat de armleuning goed zakt, zodat deze weer vast staat.

BEEN- EN VOETENSTEUN

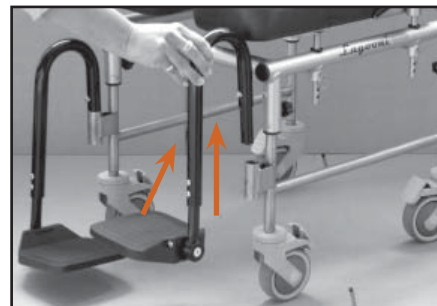

Trek de beensteunen omhoog en draai deze weg. De voetenplaat kan opgeklapt worden. De hoogte van de voetenplaat kan versteld worden met imbusleutel nr. 4.

ZITHOOGTE

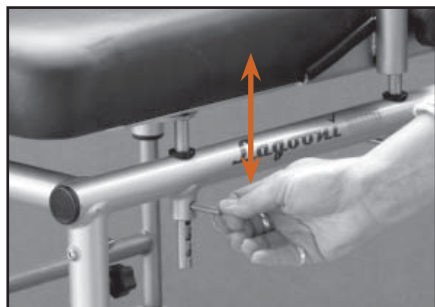


Verwijder de 4 quick-release pennen aan de onderkant van de zitting.




Trek de aan de rugleuning de zitting omhoog in de gewenste stand. Plaats de quick-release pennen terug.

WIG

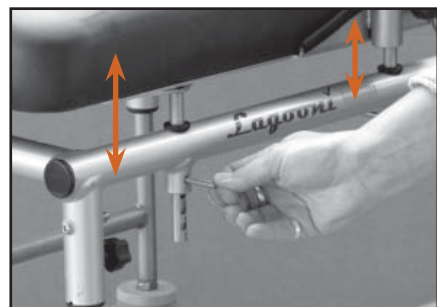

Voor wig-verstelling kan de voorkant maximaal 1 gat hoger gezet worden dan de achterkant. Plaats de pennen aan de voorkant en duw de achterkant omlaag.

DEMONTEREN

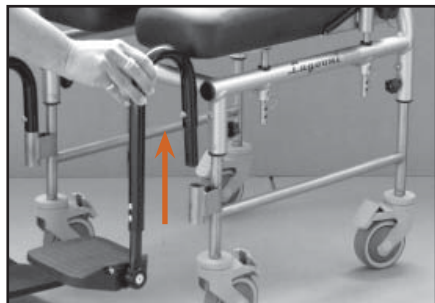

Verwijder de beensteunen door deze omhoog te trekken.



Verwijder de armsteunen door deze omhoog te trekken.



Verwijder de quick release pennen en druk de zitting in de laagste stand. Plaats de quick release pennen weer terug.



Draai de knoppen van de rugleuning los en trek de quick-release pennen uit de rugleuning, zodat de rugleuning omgedraaid kan worden.




Draai de rugleuning om, zodat de buiging naar voren wijst. Plaats de rugleuning terug in de ontvangers en plaats ook de quick-release pennen weer terug.




Klap de rugleuning omlaag en draai de draaiknoppen weer aan.



Verwijder - indien van toepassing - de achterwielen door de quick release assen in te drukken.

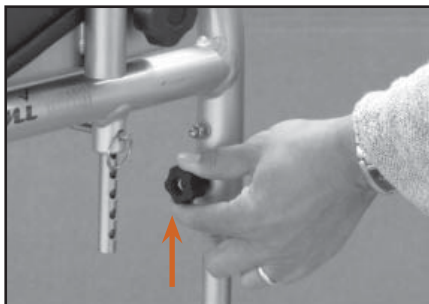

Verwijder de 4 kleine draaiknoppen van de poten van de rolstoel.

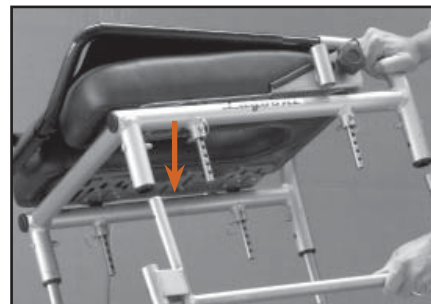


Trek de poten uit het frame.

INPAKKEN IN DE KOFFER



Open de koffer en leg iets op de bodem om de rolstoel te beschermen. Rits het bovenste vak minimaal voor de helft open.

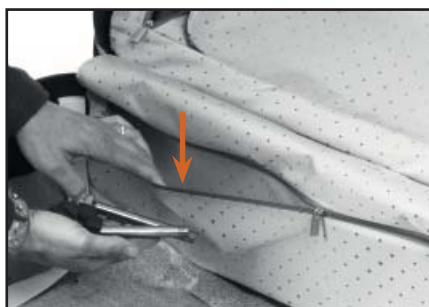

Plaats de draaiknoppen, assen en andere kleine onderdelen in het ritsvak in de koffer.



Plaats het frame met de zitting naar beneden in de koffer. Bij een zitbreedte van 46 cm of meer, moet de zitting los van het frame en een kwart slag gedraaid worden.



Leg de poten in de koffer.



Plaats de armsteunen in de koffer tussen de stoelpoten.



Plaats de beensteunen achter het frame in de koffer.



Plaats eventuele aanvullende onderdelen zoals een ondersteek of vouwemmer in de koffer.



Indien van toepassing: plaats de 20" achterwielen in de deksel van de koffer. De wielen moeten aan één kant van de deksel geplaatst worden en elkaar gedeeltelijk overlappen.

✓ Verwijder regelmatig zeep- en vuilresten met een zachte zeep zoals groene zeep (gebruik geen bijtende middelen zoals chloor of alcohol). Het frame kan gereinigd worden met antikal.

✓ Neopreen en platilon zijn comfortabele maar kwetsbare materialen. Wees daarom voorzichtig met scherpe voorwerpen ritsen, knopen, transferplank of tillift.