

**RUGHOEK**



Draai de knoppen links en rechts van de rugleuning los, zodat de kartelschijven vrij kunnen roteren.



Stel de rugleuning in de gewenste stand en draai de knoppen links en rechts weer vast.

**ARMSTEUNEN**



Trek de armsteun iets omhoog om de armleuning weg te draaien. Zorg er voor bij het terugdraaien dat de armleuning goed zakt, zodat deze weer vast staat.

**ZITHOOGTE**



Verwijder de 4 quick-release pennen aan de onderkant van de zitting.



Trek de aan de rugleuning de zitting omhoog in de gewenste stand. Plaats de quick-release pennen terug.

**WIG**



Voor wig-verstelling kan de voorkant maximaal 1 gat hoger gezet worden dan de achterkant. Plaats de pennen aan de voorkant en duw de achterkant omlaag.

**VOETENSTEUN HOOGTE**



Maak aan beide kanten de voetensteun los met een inbussleutel nr. 4 en een steeksleutel nr. 10.



Plaats de voetensteun(en) in de gewenste positie en schroef deze weer vast.

**HOEK 2-DELIJGE STEUN**



De tweedelige voetensteunen hebben als mogelijkheid om deze in een hoek te plaatsen. Gebruik hiervoor een inbussleutel nr. 5.

**LOSSE BEENSTEUNEN**




De voetenplaahthoogte bij de wegzwenkbare beensteunen (life special en junior special) kan versteld worden door met inbussleutel nr. 4 de boutjes los te draaien en de voetenplaat te laten zakken.



Voor extra instelmogelijkheden van de voetenplaahthoogte/beensteunen kan ook de beugel op het frame versteld worden met inbussleutel nr. 4 en steeksleutel nr. 10.

**REMMEN**

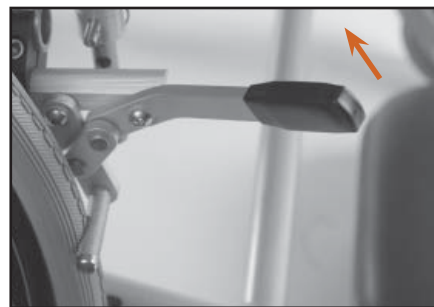

Door de remmen naar voren te duwen of omhoog te trekken vergrendelen/ontgrendelen de remmen. De remmen kunnen indien nodig strakker gesteld worden met inbussleutel nr. 5.

VERVOER LAGOONI



Plaats de zitting in de laagste stand en plaats de quick-release pennen terug.



Verwijder de arMLEUNINGEN door deze omhoog te trekken.



Verwijder bij de life-special en junior special de beensteunen door deze omhoog te trekken.



Draai de rugleuning iets los, verwijder de quick-release pennen.



Trek de rugleuning uit de ontvangers en draai de rugleuning om. Doe de rugleuning terug in de ontvangers, zodat de buiging naar beneden wijst.



Druk de quick release assen goed in (houdt deze goed in gedrukt) en trek de wielen met de assen uit het frame. Haal bij vervoer de assen uit de wielen.



## ONDERHOUD

- ✓ Verwijder regelmatig zeep- en vuilresten met een zachte zeep zoals groene zeep. Het frame kan gereinigd worden met antikal.
- ✓ De zitting kan uit de Lagooni gehaald worden, zodat deze en het hoog-laag systeem, goed schoongemaakt kunnen worden.
- ✓ Gebruik geen bijtende middelen zoals chloor of alcohol (ethanol) op de zitting. Gebruik om te desinfecteren Dettol.
- ✓ Spuit 1x per 3 maanden met siliconenspray de bewegende delen zoals de quick-release assen van de wielen en de pennen van het hoog-laag systeem en de rugleuning.
- ✓ Neopreen en platilon zijn comfortabele maar kwetsbare materialen. Wees daarom voorzichtig met scherpe voorwerpen (ritsen, knopen, etc.), transferplaten en tilliften.
- ✓ Vervang na enige tijd de bekleding. Normaal gesproken, maar sterk afhankelijk van het gebruik, kan deze 3 jaar gebruikt worden. Na 3 jaar wordt neopreen en platilon poreus en kan er water in het onderliggende polyether trekken.



## BELANGRIJK

- ✓ Houd bij het uithalen en terugzetten van de wielen, de quick-release assen goed ingedrukt, anders kan het gebeuren dat de kogellager in het wiel iets naar buiten gedrukt wordt en het wiel niet goed vastgezet kan worden.
- ✓ Mocht het onverhoopt gebeuren dat het wiel niet goed meer blijft zitten, dan is zeer waarschijnlijk de kogellager toch iets naar buiten gedrukt (de afwijking is vaak gering, maar kan wel een groot effect hebben). Tik voorzichtig met een hamer (of ander zwaar voorwerp) op de kogellager in het wiel. Deze zal weer op zijn plaats komen, zodat het wiel weer goed vastgezet kan worden.